

Accessoires

AF 207



Embouts auriculaires jetables (x 50)
Disposable ears nozzles (x 50)
Puntas desechables para los oídos (x 50)
Ohr Einwegspitzen (x 50)

AF 217

Fourchette en Inox
Inox bitefork
Horquilla de inox
Gabel aus inox



AF 220

Fourchettes jetables (x 25)
Disposable biteforks (x 25)
Horquillas desechables (x 25)
Einweg-Gabeln (x 25)

Support de fourchette
Bitefork support
Horquilla de apoyo
Traggabel



AF 700



AF 224

Appui nasal
Nasal support
Apoyo nasal
Nasenfuhrung

Bloc fourchette indexable
Bitefork assembly
Dispositivo de solidarizacion de la horquilla
Feststellen der gabel



AF 800

MONT-BLANC
EXCELLENCE INDUSTRIES



fag dentaire

647 chemin de l'épinette
74300 CLUSES – France
Tél : + 33 (4) 50 98 04 91

Arc Facial



- *Mode d'emploi*
- *User Manual*
- *Modo de empleo*
- *Bedienungsanleitung*



fag
dentaire

Arc Facial



Réf : AF200

Arc Facial avec appui nasal , support de fourchette et une fourchette plastique
 Facebow with nasal guide, fork support and one plastic bitefork

Arco facial con el apoyo nasal, soporte del horquilla y un horquilla de plástico
 Gesichtsbogen mit nasenfuhrung, Gabel Support und einer Plastikgabel



Montage de l'Arc Facial
 Mounting the Facebow
 Montaje del Arco facial
 Montage des Gesichtsbogen

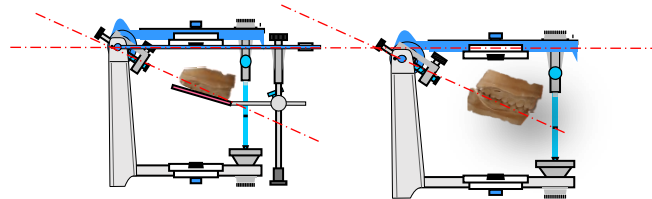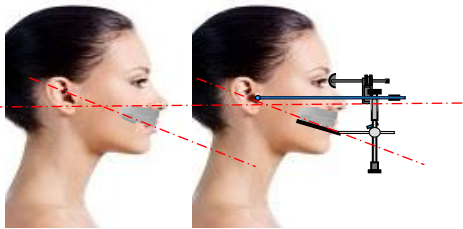

1 Mise en place et stabilisation de la fourchette
 Placement and stabilisation of the bitefork
 Colocacion en boca de la horquilla y estabilizacion
 Angelen und stabilisierung der gabel



2 Mise en place de l' arc facial et blocage
 Placement and blocking of facebow
 Colocacion del arco facial y bloqueo
 Angelen des gesichtsbogen und blocklenung



3 Mise en place de l'appui nasal et serrage
 Placement of nasal guide and blocking
 Colocacion del apoyo nasal y bloqueo
 Angelen des nasenfuhrung und blocklenung



4 Serrage du dispositif de solidarisation de la fourchette à l'arc
 Blockind of rigid connection between facebow and bitefork
 Bloqueo del dispositivo de solidarizacion de la horquilla al arco
 Feststellen der gabel



Arc facial en place
 Facebow in place
 Colocado en su sitio el arco facial
 Gesichtsbogen in stellung

